

MEDGAL VET

implanty i instrumentaria weterynaryjne




TECHNIKA OPERACYJNA

Wkręty kaniulowane




ZAMIESZCZONE WSKAZÓWKI NIE SĄ SZCZEGÓŁOWĄ INSTRUKCJĄ POSTĘPOWANIA!

WYBÓR WŁAŚCIWEJ TECHNIKI OPERACYJNEJ LEŻY W GESTII LEKARZA

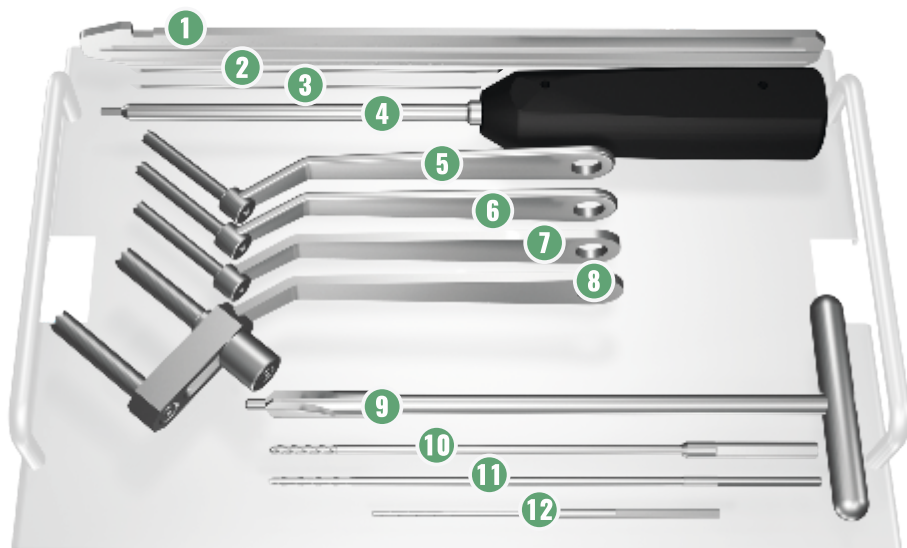


1	Miarka	80-4-48-01-20
2	2x Drut Ø 0,8	80-4-06-01-23
3	2x Drut Ø 1,0	80-4-06-02-23
4	Wkrętak kaniulowany - s2,5	80-4-48-01-49
5	Prowadnik wiertła Ø 2,4/2,6	80-4-48-03-15
6	Prowadnik wiertła Ø 1,8	80-4-48-03-03
7	Prowadnik Kirschnera Ø 1,0	80-4-48-01-15
8	Prowadnik równoległy	80-4-48-01-22
9	Pogłębiacz	80-28-2-4.60
10	Wiertło kaniulowane Ø 2,6	80-4-48-03-17
11	Wiertło kaniulowane Ø 2,4	80-4-48-03-10
12	Wiertło kaniulowane Ø 1,8	80-4-48-03-01

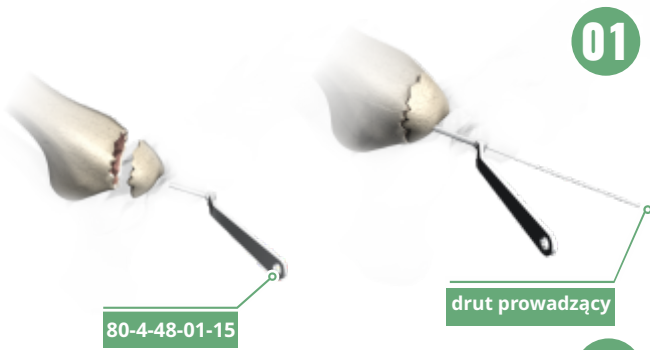


01

Ustabilizować odłam przy pomocy druta prowadzącego (tab. 1) używając przewodnika **80-4-48-01-15**.

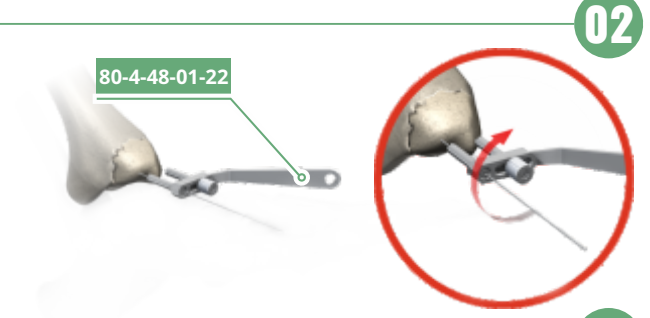

02

W przypadku zastosowania 2 wkrętów, zmienić prowadnik na równoległy **80-4-48-01-22** i ustalić właściwą pozycję. Zablokować tuleję.

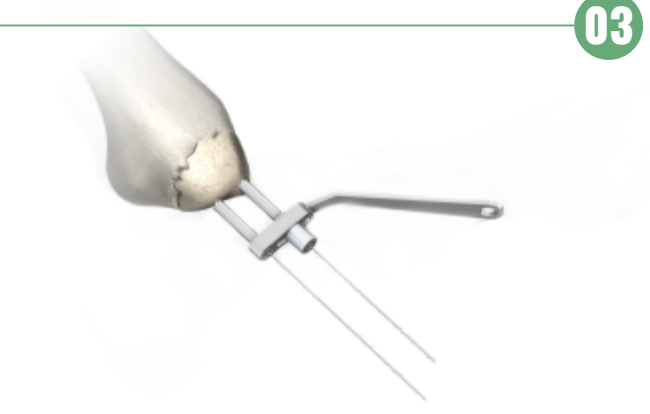


03

Wprowadzić kolejny drut prowadzący (tab.1)

Tab.1


Ø		Wkręt	Ø	Drut prowadzący
2,4		80-X-01-286-XX	0,8	80-4-06-01-23
		80-X-01-285-XX		
3,5		80-X-01-100-XX	1,0	80-4-06-02-23
		80-X-01-101-XX		
4,0		80-X-01-231-XX		
		80-X-01-232-XX		

04

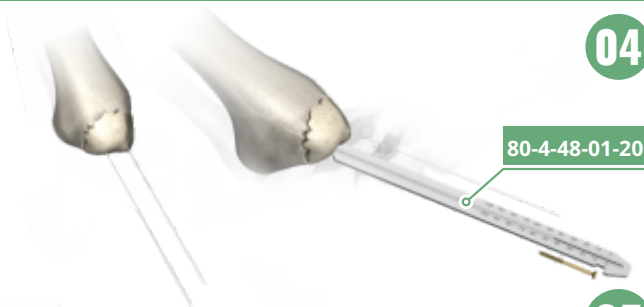


Dokonać pomiaru głębokości wiercenia i dobrać długość wkręta używając miarki **80-4-48-01-20**.

05

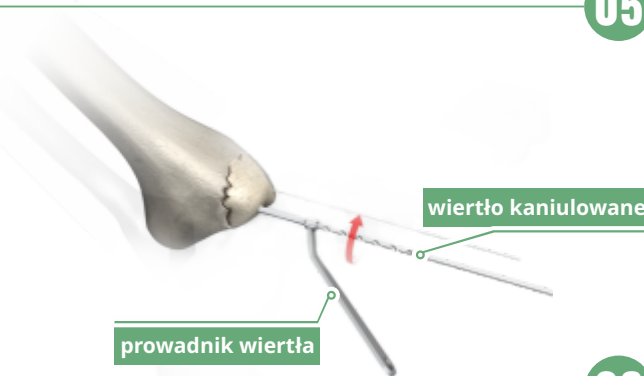

Przy pomocy odpowiedniego wiertła i prowadnika wykonać otwór (tab. 2).


06

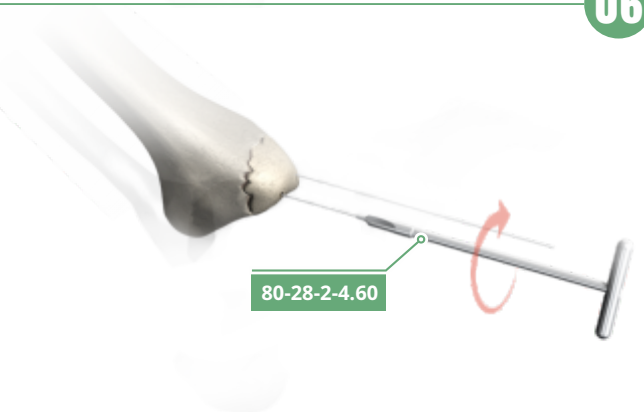


Powiększyć otwór pod łeb wkręta pogłębiaczem **80-28-2-4.60**

Tab.2

Ø	Wkręt	Prowadnik wiertła	Wiertło kaniulowane	
2,4	80-X-01-286-XX	80-4-48-03-03	Ø 1,8	80-4-48-03-01
	80-X-01-285-XX			
3,5	80-X-01-100-XX	80-4-48-03-15	Ø 2,4	80-4-48-03-10
	80-X-01-101-XX			
4,0	80-X-01-231-XX		Ø 2,6	80-4-48-03-17
	80-X-01-232-XX			

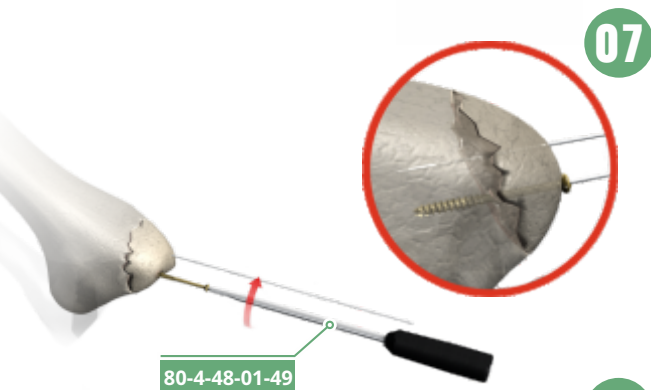**07**

Wprowadzić odpowiedni wkręt kaniulowany przy pomocy wkrętaka **80-4-48-01-49**.

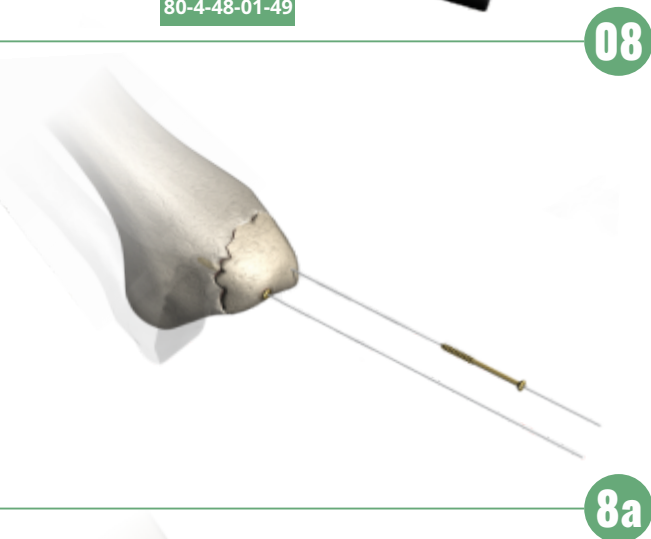**08**

Tą samą metodą wprowadzić kolejny wkręt kaniulowany. W celu zminimalizowania podrażnienia tkanek miękkich, łby wkrętów powinny być zagłębione w kości.

**8a**

Usunąć druty prowadzące.

MEDGAL VET

implanty i instrumentaria weterynaryjne

MEDGAL[®] Sp. z o.o.
ul. Niewodnicka 26A
16-001 Księżyno

DZIAŁ MARKETINGU I SPRZEDAŻY
kontakt@medgalvet.com.pl

CENTRALA
telefon: +48 85 6632 344
fax+48 85 6632 622

